


# DENTAL WHITENIG GEL

# DENTAL WHITENIG GEL

angelus® HOME 10% 16%

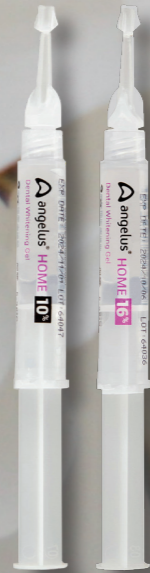

コードNo.	製品名	標準価格
444119	アンジェラス ホーム10% スターターセット	6,400
444044	アンジェラス ホーム10%2本入	3,000
444051	アンジェラス ホーム10%6本入	6,700
444069	アンジェラス ホーム10%12本入	12,500
444126	アンジェラス ホーム16% スターターセット	7,200
444083	アンジェラス ホーム16%2本入	3,500
444091	アンジェラス ホーム16%6本入	7,300
444101	アンジェラス ホーム16%12本入	13,000
444076	アンジェラス ホーム マウストレー 5枚入	1,800

アンジェラスホーム10%(16%)スターターセット内容  
 \*アンジェラスホーム10%(16%)3gシリンジ×4本  
 \*アンジェラスホームマウストレー×2枚  
 \*リーフレット(カラーチャート記録用紙付)×1セット  
 シリンジ単品は10%、16%全て内容量3.0gです。



▲ 製品紹介動画



▲ 院内用ホワイトニング  
紹介動画

一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材  
 販売名：アンジェラス ホーム  
 承認番号：30100BZX00059000

一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材  
 販売名：アンジェラス ホーム 16%  
 承認番号：30400BZX00204000

一般的名称：歯科用咬合スプリント  
 販売名：アンジェラス ホーム マウストレー  
 届出番号：27B1X00147000005



# ラインナップ

患者さまの負担が少なく、手軽に行えるホームホワイトニング材で健康的な白い歯へ。  
充実した関連製品がホワイトニング治療をトータルでサポートします。

効率重視の方には

フッ化ナトリウム  
硝酸カリウム含有

過酸化尿素 **16%**

装着時間 **1.5時間**



優しさ重視の方には

フッ化ナトリウム  
硝酸カリウム含有

過酸化尿素 **10%**

装着時間 **2時間**



## ホワイトニングに関するQ&A

### Q.1

ホワイトニングって  
痛くないの？

A.

治療中に感じる不快症状として  
知覚過敏があげられます。

### Q.2

ホワイトニングの  
効果はどれくらい  
持続しますか？

A.

生活スタイルや加齢現象により  
若干あと戻り（治療前の歯の色  
に近づく）があります。  
しかし、定期的にタッチアップを  
することで白さが続きます。

### Q.3

詰め物やかぶせも  
白くなりますか？

A.


ホワイトニングは天然歯のエナ  
メル質だけに作用します。充填  
物や前装冠を白くすることは  
できません。治療後の新しい色  
に合わせて取り換えが必要になる  
ことがあります。

### Q.4

他治療との  
関連は？

A.

ラミネートベニアやオール  
セラミック等の審美的な治療  
の際、あらかじめそれ以外の  
歯にホワイトニングを施して  
おくことで、よりよい結果が  
期待できます

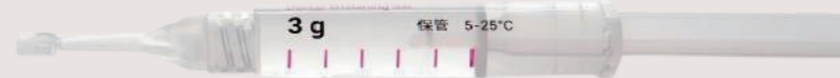

シリンジ内容量3.0g

※ 6 歯合計で1目盛り(0.5g)が目安です。  
※ 本品の使用前、使用後は冷蔵保存をお勧めします。  
※ 製品には気泡が混入していることがありますが、品質等には問題ありません。


## シンプルな処置で 歯科医院さま、患者さまの負担を軽減

### 歯科医院での処置

#### 1 診察・診断

歯のみならず歯肉その他口腔  
内全体の診査をします。

※ ホワイトニング治療を始める前に  
必要な歯科治療がある場合があります。

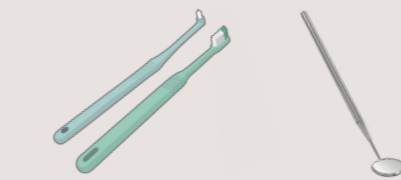

#### 3 治療について 説明

治療方法、治療期間、  
治療費等の説明を  
受けます。

#### 4 印象採得 マウストレーの製作

治療を決めた後  
マウストレーの製作のため  
上下の歯の型を取ります。

#### 2 治療

ホワイトニング治療だけ  
では良好な改善がなく、  
セラミック冠などの治療の  
追加が必要な場合があります。



#### 5 マウストレーの試適 使用方法の説明

マウストレーを試適し、使用  
方法の説明を受けます。  
マウストレー、10%または  
16%のホワイトニングジェル  
を受け取ります。


### 自宅で行う処置

#### 1 清掃

マウストレー装着の前に  
歯磨きをします。

#### 3 マウストレーの装着 使用後のお手入れ

歯科医師より指示された時間を  
守ってマウストレーを装着しま  
す。マウストレーを外したら、  
口腔内をよくすすぎ歯みがきを  
します。  
マウストレーは水で洗浄し  
ます。高温のお湯を使用すると  
マウストレーが変形します。  
マウストレーはトレーケースに  
入れて常温で保存します。  
ホワイトニングジェルはキャップ  
をしっかり締め、冷蔵庫に保管  
します。

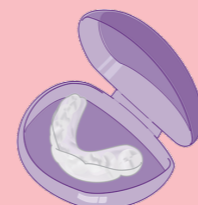

#### 2 ジェルの注入

キャップを外してシリンジの  
プランジャーを押してホワイト  
ニングジェルを出します。  
マウストレーの内面の液溜め  
に、10%または16%のホワイト  
ニングジェルを1歯あたり  
米粒1~2粒大を入れます。

#### チップのご使用上注意

アプリケーションチップの先端を、くびれ  
部分で折り切ります。(切り取ったZバー  
ツは上下逆さまにして装着することで  
抽出口のキャップになります)キャップ  
突起部をアプリケーションチップ先端部  
に押し込むように挿入して先端部を  
しっかり開口してください。開口が  
不十分だとホワイトニングジェルが  
出にくくなります。



#### 4 ホワイトニング後

マウストレーを外した後は、少  
なくとも30分間はコーヒー・紅茶  
など色のついた飲食物は避けま  
しょう。

