



ダイレクトダイヤペースト キット

¥3,000

- キット内容:
 ダイレクトダイヤペースト 3g...1
 スーパーナップ バフディスク No.8...5
 松風マンドレル(ワングロス用)CA...1
 ノズル...2

■販売名・一般の名称

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
ダイレクトダイヤペースト キット	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000199



松風スーパーナップ
バフディスク

25個 ¥1,100
(専用マンドレルCA1本付)

形態 2種:バフディスク No.8(φ8mm)
バフディスク No.12(φ12mm)



松風マンドレル
(ワングロス用)

6本 ¥800

種類 2種:HP,CA

PMTc関連製品



メルサージュ
フッ素配合歯面研磨ペースト

包装・価格 40g 各¥1,600
種類 2種:レギュラー(粗粒・ミント)
ファイン(細粒・レモン)



メルサージュ プラス
フッ素配合歯面研磨ペースト(薬用歯磨)

包装・価格 38g ¥1,600
種類 1種:(微細粒・オレンジ)



プレサージュ ポイント
歯面研磨材

包装・価格 25個 ¥2,400
(専用マンドレルCA1本付)



スクリータイプ
メルサージュ ブラシ
歯面研磨清掃用

No.11 36本 ¥2,800
No.13 36本 ¥2,800



CAタイプ
メルサージュ ブラシ
歯面研磨清掃用

No.1 36本 ¥3,000
No.2 36本 ¥4,500
No.3 36本 ¥3,000



スクリータイプ
メルサージュ カップ
歯面研磨清掃仕上げ用

No.12 36本 ¥1,800
No.13 36本 ¥1,800
No.14 36本 ¥1,800
No.15 36本 ¥2,400



CAタイプ
メルサージュ カップ
歯面研磨清掃仕上げ用

No.1 36本 ¥4,500
No.2 36本 ¥3,000
No.3 36本 ¥3,000
No.4 36本 ¥3,600

補綴・修復物の光沢研磨に



コンポマスター(CA)
コンボジットレジン用ダイヤモンドポリッシャー

No.10S 3本 ¥2,900
No.13S 3本 ¥2,900
カップ 3本 ¥2,900
No.28 4本 ¥2,900



CRポリッシャーPS(CA)
コンボジットレジン用ダイヤモンドポリッシャー

No.1(コーン) 6本 ¥2,000
No.2(ディスク) 6本 ¥2,000
No.3(カップ) 6本 ¥2,000

価格は2018年7月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店



補綴・修復物用着色除去、ツヤ出し研磨ペースト
ダイレクトダイヤペースト キット

Official partner
miCD
Minimally Invasive
Cosmetic Dentistry

DirectDia Paste Kit

Diamond Polishing Paste kit ダイヤモンド研磨ペーストキット

口腔内の補綴・修復物用

PMTcや日常の診療に
“プラスワン”



PMTC時の補綴・修復物の研磨でこんな経験はありませんか？

- 補綴・修復物を研磨するとき、くもってしまったりなかなかツヤが出ない
- 口腔内に色々な種類の補綴・修復物が入っていて何を使って研磨したら良いのかわからなかった
- 粗いペーストを使って補綴・修復物を傷つけてしまった
- 今使っている研磨材に満足できない

ひとつでも当てはまる方は、ぜひ **ダイレクトダイヤモンドペースト** をお試しください。

1

各種補綴・修復物を美しく光らせます

様々な補綴・修復物に幅広く対応できるその理由は、ペーストに配合された微細なダイヤモンド砥粒。ダイヤモンドなので硬い補綴・修復物も手軽に美しく、微細なので軟らかい補綴・修復物も荒らさず研磨できます。

※メタルを研磨すると研磨粉でペーストが黒くなりますが、性能に問題はありません。

2

1歯分に対する使用量は米粒大！

シリンジ1本で約150歯分研磨できます。

3

患者様を快適サポート

爽やかなライムのフレーバーとやわらかいバフディスクでの研磨が患者様の口腔内を快適にサポートします。



4

ペーストと相性の良いバフディスク

バフディスクにペーストをつけて研磨してください。ダイレクトダイヤモンドペーストとの相乗効果で補綴・修復物を更に美しく光らせます。研磨布とプラスチックシートの2層構造で適度な弾力があり、咬合面や隣接付近も簡単に研磨できます。



注意 ●ツヤ出しには必ずバフディスクをお使いください。
●研磨する際は、力を加えず低速(1,000~2,000min⁻¹)でお使いください。

→こんな場面でお使いください

CASE 1 | PMTC時の補綴・修復物の研磨に

■プラスワンで、くもった補綴・修復物のツヤを復活

- 対象** 日常のブラッシングや咬耗、着色等でツヤをなくした補綴・修復物
- 用法** 通常のPMTCに補綴・修復物のための工程をプラスしてお使いください。
- 効果** くもった補綴・修復物のツヤを復活。ステインやプラークの付着防止にも効果があります。



ツヤを失った補綴・修復物



ツヤが復活！

& MORE




軽度のステインも除去できます

CASE 2 | 補綴・修復物の光沢仕上げ研磨に

■プラスワンで補綴・修復物をさらに美しく

- 対象** 咬合調整後の補綴物、充填後の修復物
- 用法** 形態修整・咬合調整後にお使いください。面が荒れている場合は先にシリコンポイント等で研磨してからお使いいただくと、スムーズに光沢が得られます。
- 効果** 新しい補綴・修復物をさらに美しく。見た目だけでなく患者様の舌感も確実に変わります。

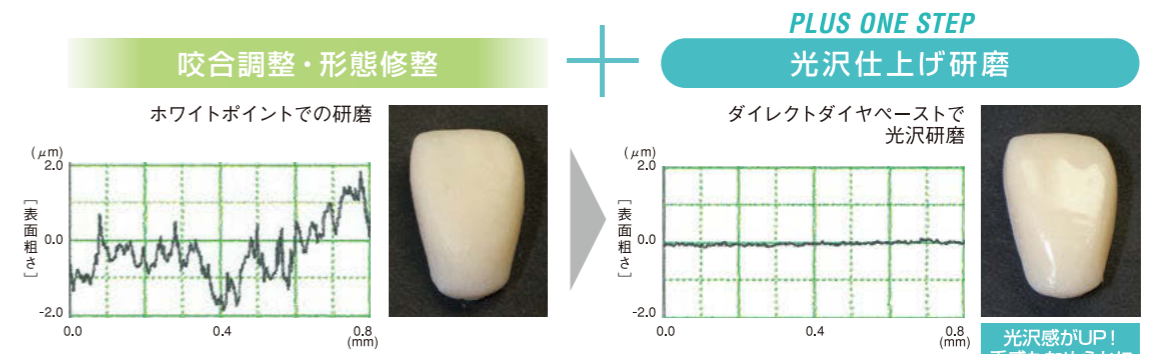

※被研磨体：セラマージュ