


パロデントプラス発売記念キャンペーン

パロデントプラスは、ニッケルチタン製のリング、解剖学的に設計されたマトリックス、適応性のあるウェッジを備え、II級コンポジット充填においてタイトなコンタクトと天然歯の解剖学を再現した修復物を提供するセクショナルマトリックスシステムです。ご新規のお客様にお求めやすい価格にてご提供いたしますので、ぜひこの機会にご利用ください。

II級窩洞をI級単純窩洞へ導く パロデント プラスシステム

- 優れたばね強度と記憶力を持つNi-Tiリング
- ガラス繊維強化プラスチック製のタインは、クサビに対応したV字型形状
- 装着・取り外しを簡便にするピンホール
- 挿入しやすいトップタブとマトリックスの取り外しに便利なサイドタブを装備
- 歯頸部のギャップを防ぐマトリックス形状
- 歯牙をしっかりと包み込むマトリックス形状
- 辺縁部隆線の形態を有するマトリックス形状

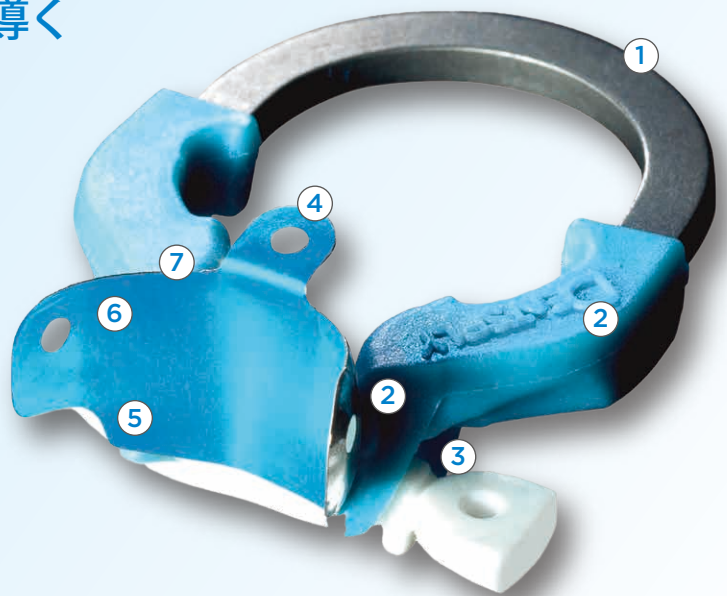

パロデントプラス イントロキット

- ・ユニバーサルリング (1個)
- ・ナローリング (1個)
- ・EZコートマトリックス3.5mm (25個)
- ・EZコートマトリックス4.5mm (25個)
- ・EZコートマトリックス5.5mm (25個)
- ・EZコートマトリックス6.5mm (25個)
- ・ウェッジS (25個)
- ・ウェッジM (25個)
- ・ウェッジL (25個)
- ・ウェッジガードS (10個)
- ・ウェッジガードM (10個)
- ・ウェッジガードL (10個)
- ・フォーセプス (1本)
- ・ピンツィーザー (1本)



標準価格：71,440円

▶ 特別価格

ユニバーサルリング

- ・2個入り
- ・大白歯用リング

標準価格：25,430円

▶ 特別価格




ナローリング

- ・2個入り
- ・小白歯用リング

標準価格：25,430円

▶ 特別価格




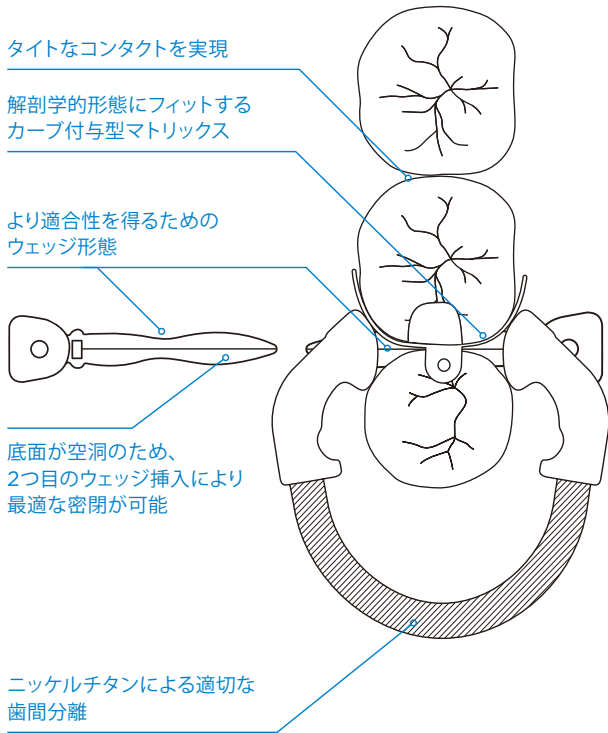


簡便な装着方法(4step)



1
ピンツィーザーを使い、ウェッジまたはウェッジガードを舌側または頬側からしっかりと装着し、プレパレーションを行います。

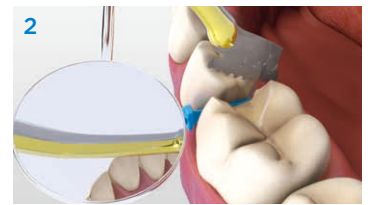

2
プレパレーション後、ウェッジガードを使用する場合は、ミラーや歯科用器具でウェッジを支え、ピンツィーザーを使用してシールドを剥がします。

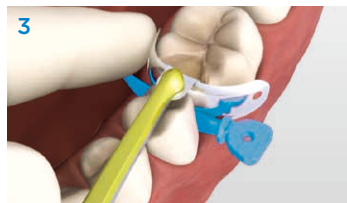

3
ピンツィーザーを用いてマトリックスをセットします。この際、ウェッジによりマトリックスが装着しづらい場合は、一度ウェッジを取り外し、マトリックス、ウェッジの順で装着します。



4
フォーセプスにてリングを把持し、ウェッジにまたがるようにリングをセットします。

ご注文書

パロデントプラス発売記念キャンペーン

キャンペーン期間:

2023年8月21日～10月31日

No.	品番	製品名	標準価格	ご注文数
1	659670	パロデントプラス イントロキット	71,440円	特別価格
2	659760	ユニバーサルリング	25,430円	
3	659770	ナローリング	25,430円	

販売名:パロデント プラス 一般的名称:歯科用充填・修復材補助器具 届出番号:13B1X10236Y04480 クラス分類:クラスI(一般)

*表示価格は、2023年7月現在のメーカー標準価格で消費税は含まれません。

■キャンペーン注意事項 ①キャンペーン商品の返品および交換は一切いたしかねます。②他の特別価格商品と併用してご利用いただくことはできません。③本キャンペーンをご注文いただく際には、本チラシの注文欄をご利用いただくか、注文用紙にキャンペーンである旨を必ず記入下さい。④ご注文の状況によりませんが、商品によってはお届けにお時間がかかる場合があります事、予めご了承下さい。

ご施設名

〒 - ※郵便番号は必ず記入してください。

ご住所

TEL:

FAX:

お取り扱い商店

デンツプライシロナ株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5階
カスタマーサービス ☎ 0120-461-868 (受付時間/9:00~17:00 土日祝日を除く)