



取扱い始めました！！

# MicroMega HandFlex

ハンドフレックス

保険根管治療の

成功率を上げるように

新しいチョイスがあります！！

COLTENE

保存修復製品  
シリコン印象材

SciCan

DIATECH

MICRO  
MEGA

## 熱処理 NiTi ワイヤー

ハンドファイルシステムで  
ロータリーファイルのように

- ◆ 根尖トランスポートーションを**軽減**
- ◆ **化学洗淨効果**を向上
- ◆ 作業**効率**を向上

- ◇ 根管拡大形成
- ◇ 再帰ファイリング

1本あたり  
**291**円  
価格



COLTENE

多くの保険診療において使用されているハンドファイルに着目し、初期治療をより安全に効率的に行えるよう、高い技術力を駆使して開発された熱処理NiTiワイヤーのハンドファイルシステムです。

根尖でのトランスポーテーションやレジの発生を軽減させる

ために設計・開発されております。

ぜひこの機会にお試しください！

ハンドフレックス使用手順 ▶ フルレングス法 (ファイルを作業長まで到達させ、根管を拡大する方法)

バランスドフォーステクニック

ステンレススチール  
ファイル

必要に応じて使用



ハンドフレックス  
拡大



ハンドフレックス  
オプション



根尖 (WL)



HandFlex-NiTi HandFile system  
無料オンデマンドセミナーのご視聴はこちら！

HandFlexに関する製品特徴・使用方法等  
をご確認いただけます。

平和歯科医院、阿部修 先生

配信期限：2024年6月19日




HandFlexに関する推奨使用方法を  
をご確認いただけます。

北海道大学大学院歯学研究院  
口腔健康科学分野  
歯科保存学教室、友清淳 教授

配信期限：無期限



写真提供：きのもと歯科医院、木ノ本喜史 先生

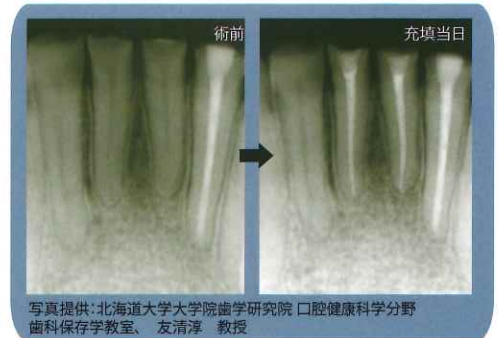

写真提供：北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野  
歯科保存学教室、友清淳 教授

ORDER INFORMATION

サイズ	21mm	25mm	本数	価格
15/.04	6003 1435	6003 1472	6	1,750円
20/.05	6003 1465	6003 1473	6	1,750円
25/.06	6003 1466	6003 1474	6	1,750円
35/.04	6003 1467	6003 1475	6	1,750円
45/.02	6003 1468	6003 1476	6	1,750円
50/.02	6003 1469	6003 1477	6	1,750円
55/.02	6003 1470	6003 1478	6	1,750円
60/.02	6003 1471	6003 1479	6	1,750円
アソート#15-#35	6003 1488	6003 1489	4	1,170円
アソート#45-#60	6003 1491	6003 1492	4	1,170円

※価格は希望医院価格です (価格に消費税は含まれておりません)。

ご用命は

ジーシーグループ

[取扱店]



株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造販売業者

コルテンジャパン合同会社

〒190-0012  
東京都立川市曙町2丁目25-1

TEL: 042-595-6945

FAX: 042-595-6946

www.coltene.com

販売名：ハンドフレックス 届出番号：13B3X10317000001

# MicroMega

ROOT CANAL SHAPING  
GuttaPercha REMOVAL

## One RECI ワン レシ

## One Flare ワン フレア

## One G ワン ジー



## Remover リムーバー



#45/4% #35/4% #25/6% #25/4% #20/4%

### 安全性を高めた断面形状※とMI-NiTiワイヤーの ワンファイル・レシプロケーションシステム

※JOEVol48, No.1 Jan2022 "Apical Extruded Debris in Curved Canals"

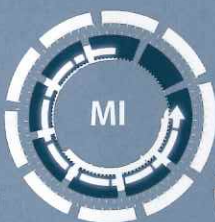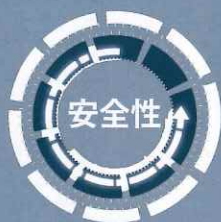

 COLTENE

- #20/4%
  - #25/4%
  - #25/6%
  - #35/4%
  - #45/4%
- 各サイズ21mm / 25mm

# One RECI

ワンレシ  
レシプロケーション  
根管拡大・形成

レシプロケーション  
単回使用

STERILEEO 滅菌済み

C-Wire 熱処理NiTiワイヤー使用



直径 **1.0mm** NiTiワイヤー使用  
歯頸部周囲および歯の硬組織の保存



弊社特許の左右非対称断面



熱処理NiTiワイヤー・システム



切削片の排出に  
優れたらせん形状※

イニシャルトリートメントに  
優れた1.0mmのMIワイヤ※※



ワンファイルシステム


滅菌済み包装

MicroMega  
One Flare  
#15/9%  
根管口拡大

Hand File  
#08 or #10  
穿通


MicroMega  
One G  
#14/3%  
グライドパス

MicroMega  
One RECI  
#25/6%  
根管拡大・形成

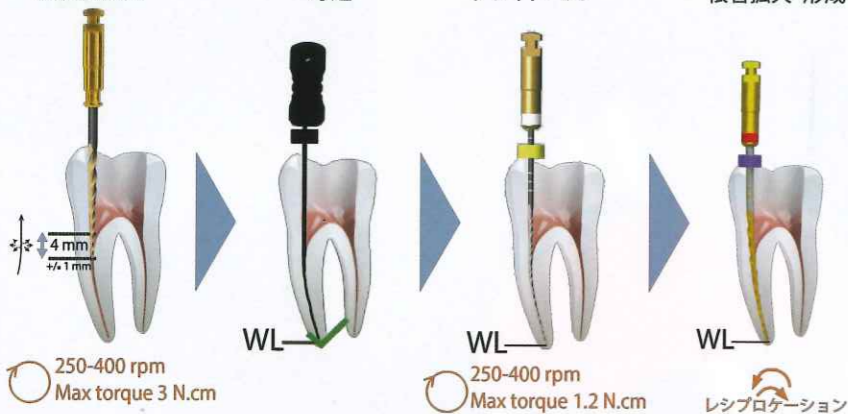


症例に応じて、One RECIのファイルサイズを選択してください。

歯頸部周囲および歯の硬組織の保存

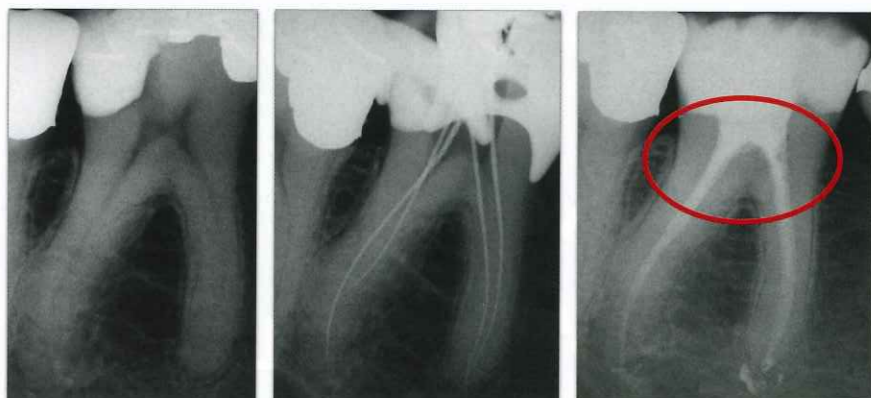

Dr. Filippo CARDINALLY - イタリア

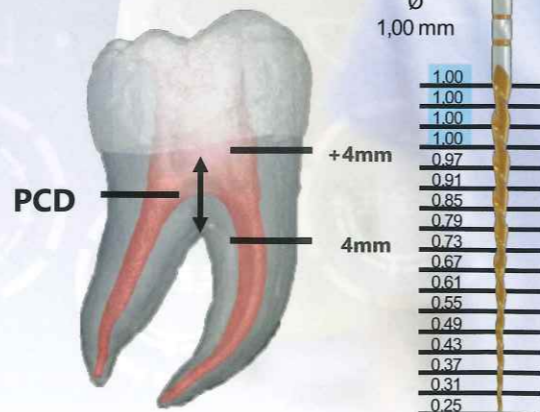

MicroMega  
One RECI  
#25/6%

# One Flare

ワンフレア  
根管口拡大



柔軟性の  
向上  
破折抵抗の  
向上



#25/9%  
17mm

正回転：250-400 rpm  
トルク：3.0 N.cm

STERILEEO 滅菌済み

T-Wire: 熱処理NiTiワイヤー使用

+50%  
柔軟性

従来自社製品  
One Flare

クロスセクション




# One G

ワンジー  
グライドパス

3つの刃先が歯根軸に対してそれぞれ異なる半径範囲に  
配置され、切削片の掻き上げと穿通効率を向上させます。

非切削先端

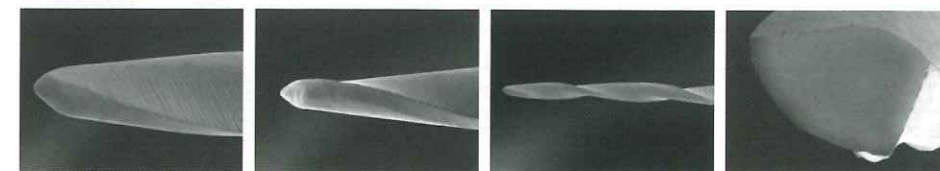

SEM views: Prof. Hyeon-Cheol KIM (South Korea)

ねじ込みを防ぐため  
らせん間が可変ピッチ

正回転：250-400 rpm  
トルク：1.2 N.cm  
単回使用

STERILEEO 滅菌済み

NiTiワイヤー使用



#14/3%  
21mm / 25mm

※MicroMega特許  
※One FlareとOne Gは1.2mmワイヤー使用

# MicroMega Remover

## リムーバー

ガッタパーチャー除去

#30/7% (19mm/23mm)



より解剖学的な再根管治療が可能に

ポイント① 従来品GP除去ファイルより柔軟性と切削除去効率を向上させた熱処理NiTiワイヤーを使用


ポイント② マイクロメガ ワンレシと同様、直径1mm MI-NiTiワイヤーを使用



非対称

断面形状  
トリプルヘリックス

対称

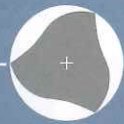


### マイクロメガ リムーバー プロトコル

MicroMega One Flare

MicroMega Remover

MicroMega One Flare

MicroMega Remover

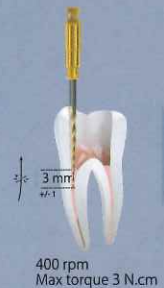

400 rpm  
Max torque 3 N.cm

400-800 rpm  
Max torque 2.5 N.cm

400 rpm  
Max torque 3 N.cm

400-800 rpm  
Max torque 2.5 N.cm

充填材が根尖までである場合

充填材がアンダーの場合

ガッタパーチャー除去後は、マイクロメガ ワンレシで残り3mmのガッタパーチャーを除去し、再度拡大形成を行ってください。

優れたクロス・セクション工程により

切削力と柔軟性を兼ね備えたガッタパーチャー除去ファイルを実現

正回転：400-800 rpm

トルク：2.5 N.cm

単回使用

STERILE EO

滅菌済み



熱処理NiTiワイヤー使用

## ORDER INFORMATION

製品名

マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#20/4%	黄	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#25/4%	赤	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#25/6%	赤	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#35/4%	緑	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#45/4%	白	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm	アソート		5本	9,000円
マイクロメガ ワンレシ	25mm	アソート		5本	9,000円
マイクロメガ ワンフレア	17mm	#25/9%		5本	9,000円
マイクロメガ ワンジー	21mm/25mm	#14/3%		各5本	各9,000円
マイクロメガ リムーバー	19mm/23mm	#30/7%		各5本	各7,000円

ジーシーグループ [販売元]



### 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

選任製造販売業者

AJMD 株式会社  
〒103-0004  
東京都中央区東日本橋2-4-5  
真光ビルディング  
TEL: 03-5614-0733  
FAX: 03-5614-0734

コルテンジャパン合同会社  
〒190-0012  
東京都立川市曙町2丁目25-1  
TEL: 042-595-6945  
FAX: 042-595-6946  
www.coltene.com

販売名: マイクロメガNiTiローターファイルシステム  
医療機器認証番号: 304AGB2I00001000

COLTENE

Follow Us

