

キャンペーン期間 2024.4.22 ▶▶ 5.20 (期間・数量限定)

ジーセム ONE EM バリュースーツ

新規 & ご愛用感謝

CAMPAIGN

平素はジーセム製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、右記2024年6月1日施行の特定保険医療材料の改定に合わせ、
「ジーセム ONE EM バリュースーツ 新規&ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーセム製品をご用命ください。

ジーセム ONE EM バリュースーツ (5本入) 1 函と

キャンペーンセット品 プライマー2種 & 採取皿 1 セットを
組み合わせ価格にてご提供!



歯科接着用レジンセメント

ジーセム ONE EM バリュースーツ 5本入

色調 ● 1色 = ユニバーサル (A2)

包装・希望医院価格 ● 1 函: シリンジ (2.7mL) 5 本、EMミキシングチップT40個、
EMミキシングチップF5個、EMミキシングチップF用ノズルRC5個、
テクニカルチャート1部 = ¥22,250

管理医療機器 301AKBZX00021000



ユニバーサル (A2)



キャンペーンセット品



接着強化プライマー
1mL (特別仕様)



【期間限定販売品】包装・希望医院価格
1 函: 1mL 1 本 = ¥1,700
歯科用象牙質接着材
管理医療機器 228AKBZX00104000



G-マルチプライマー
1mL (特別仕様)



【期間限定販売品】包装・希望医院価格
1 函: 1mL 1 本 = ¥2,800
歯科セラミックス用接着材料
管理医療機器 228AABZX00003000



ジーセム ONE
専用採取皿



【期間限定販売品】
希望医院価格 ¥1,000

プライマー塗りまちがえ防止!!!

Check!

2024年
6月1日施行

診療報酬の点数UP!

歯科用合着・接着材料I (レジン系 / 自動練和型)

17点 → 38点
UP

※改定後の保険点数での請求は、
2024年6月1日からとなりますのでご注意ください。

プライマーについての詳細は裏面へ ▶▶▶

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2024年4月22日~5月20日

貴医院名 _____
ご住所 〒 _____
TEL () _____
お取引販売店 _____ 様
ご担当者 _____

対象製品	ご購入数	キャンペーンセット品
ジーセム ONE EM バリュースーツ5本入 ユニバーサル (A2)		接着強化プライマー 1mL (特別仕様) 1本 + G-マルチプライマー 1mL (特別仕様) 1本 + ジーセム ONE 専用採取皿 1個

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

支台歯の前処理

接着強化プライマー

スピーディーなタッチキュア



10秒放置



5秒乾燥



光照射なし



歯科用象牙質接着材
管理医療機器 228AKBZX00104000

- 「タッチキュア効果」(界面の重合促進効果)が付与されており、強固に支台歯・窩洞に接着します。
- すべての支台歯・窩洞に対応し、塗り分け不要です。

セットする補綴装置の種類	接着強化プライマー
メタルクラウン メタルインレー メタルコア	— 不要
ジルコニア セラミックス	○ 適宜 形成・適合条件等、強固な接着を必要とする症例
CAD/CAM冠 CAD/CAMインレー	● 必要
レジンコア(間接法)	○ 適宜

ジーシー ジーセム ONE EM / ジーセム ONE neo の前処理として

「G-プレミオ ボンド」が使用できるようになりました

G-プレミオ ボンド

10秒放置

5秒乾燥

光照射あり

十分な操作時間


- 光照射により接着する支台歯以外の余剰セメントの除去の操作が余裕を持って行えます。
- ※最終硬化までの時間は、接着強化プライマーを使用した場合と同じです。

レジンコア(間接法)には使用不可
※根管まで十分に光が届かないため

歯科用象牙質接着材 / 歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 / 歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材
管理医療機器 226AABZX00098000

歯質接着強さ

ジーシー研究所測定データ

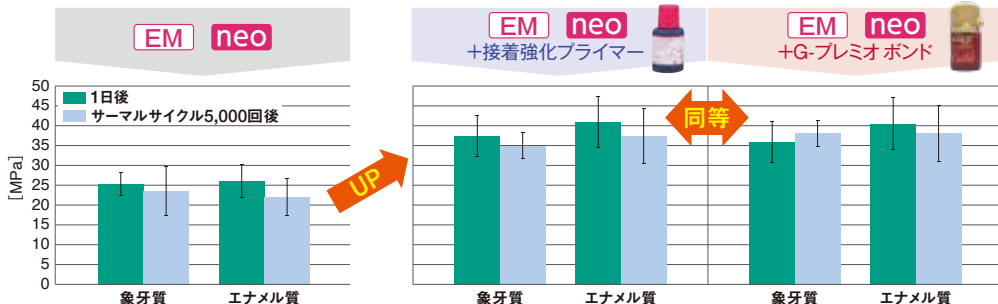

タッチキュア効果 (重合促進効果)



セメントを支台歯に先に塗布すると、口腔内の温度でセメントの硬化が早まります。必ず補綴修復物側にセメントを塗布し、装着してください。

補綴装置の前処理

G-マルチプライマー



0秒放置



乾燥必要




歯科セラミックス用接着材料
管理医療機器 228AABZX00003000

- あらゆるマテリアルに対応する接着性モノマーを配合した1液性プライマー
- 補綴装置へのシランカップリング処理が可能。

セットする補綴装置の種類	G-マルチプライマー
メタルクラウン メタルインレー メタルコア	— 不要
ジルコニア	○ 適宜 形成・適合条件等、強固な接着を必要とする症例
CAD/CAM冠 CAD/CAMインレー セラミックス レジンコア(間接法)	● 必要

各種修復材料に対するせん断接着強さ (EM)

ジーシー研究所測定データ

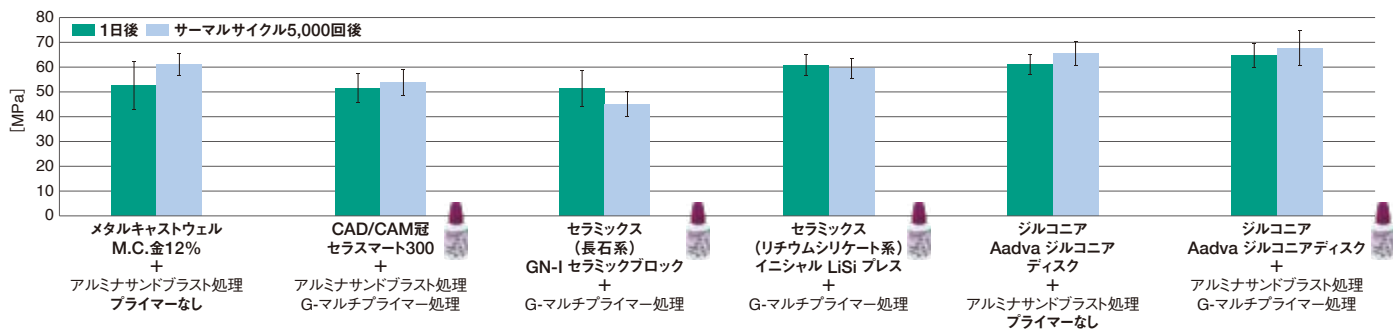

株式会社 ジーシー

- 支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は