

トクヤマFRポスト

 Tokuyama

期間限定・数量限定

2025 11/21 金

12/19 金

新規導入キャンペーン

高強度・しなやかさ・高い光透過性を兼ね備えた「トクヤマFRポスト」。
新容器には、片手で簡単に開閉できるワンタッチキャップを採用し、
使いやすさがさらに向上しました。



トクヤマFRポスト (20本)

保険適用



各サイズ 10本入×2 合計17,800円



の20本入りからお選びください

トクヤマFRポスト 歯科根管用ポスト成形品 (管理医療機器) 認証番号21700BZY00556000

ボンドマー ライトレスⅡ 歯科用象牙質接着材／歯科セラミックス用接着材料／歯科金属用接着材料
(管理医療機器) 認証番号303AFBZX00024000

ボンドマー ライトレスⅡ

ミニキット



- A液 …… 1.5mL
- B液 …… 1.2mL
- ボンドマー用混和血 …… 1個
- ダッペングラスラバー …… 1個
- 1穴ディスポ混和血 …… 3個
- ミニブラシ (ファイン) …… 25本

4,850円相当

トクヤマFRポスト(20本) +
ボンドマー ライトレス ミニキット
をセットにして

特別価格にてご提供

特別価格につきましては、お届け歯科商店様へお問い合わせください。

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。
※価格は2025年11月現在の情報に基づいています。消費税は含まれておりません。
※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

トクヤマFRポスト 新規導入キャンペーン 注文書

トクヤマFRポスト1.0mm (20本) +ボンドマー ライトレスⅡ ミニキット キャンペーン品コード [34638]	セット	トクヤマFRポスト1.2mm (20本) +ボンドマー ライトレスⅡ ミニキット キャンペーン品コード [34639]	セット	トクヤマFRポスト1.4mm (20本) +ボンドマー ライトレスⅡ ミニキット キャンペーン品コード [34640]	セット	トクヤマFRポスト1.6mm (20本) +ボンドマー ライトレスⅡ ミニキット キャンペーン品コード [34641]	セット
--	-----	--	-----	--	-----	--	-----

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

()

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、
ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日を除く)


Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル


検 索

●札幌 TEL011-812-5690 ●仙台 TEL022-717-6444 ●東京 TEL03-3835-7201 ●名古屋 TEL052-932-6851 ●大阪 TEL06-6386-0700 ●福岡 TEL092-412-3240

トクヤマFRポストは、**緻密なグラスファイバーがマトリックスレジンで強固に束ねられており、高強度であるとともにしなやかな物性です。**

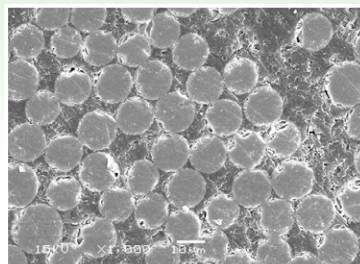

横断面(拡大)

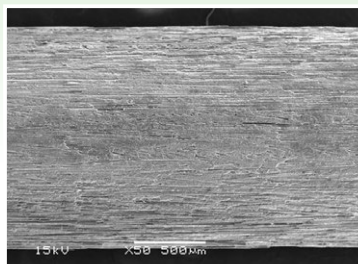


表面(拡大)

高い光透過性



光透過性が高く、光が届きにくい根管内の光硬化型コア用レジンの硬化促進が期待できます。

X線造影性

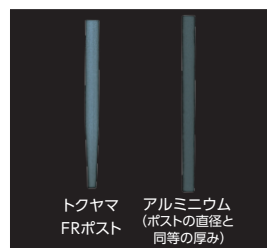

同じ厚みのアルミニウム以上のX線造影性がありますので、試適時の位置確認が容易です。

トクヤマFRポスト表面は必ずシラン処理を施してください。

ファイバーポストの表面処理



ボンドマー ライトレスⅡなら、ファイバーポストのシラン処理だけでなく、ポスト孔の歯面や支台歯、補綴物の被着面の前処理にも使用できます！

塗布後の待ち時間
ゼロ

光照射
ゼロ

レジンコア築造時の前処理



歯質・補綴物被着面の処理




エステコア ハンドタイプ 歯科用支台築造材料 (管理医療機器) 認証番号230AFBZX00052000
エステコア 歯科用支台築造材料 (管理医療機器) 認証番号225AFBZX00068000
エステセムⅡ 歯科接着用レジンセメント (管理医療機器) 認証番号228AFBZX00129000

操作手順 (ファイバーポストレジンコア) (「ボンドマー ライトレスⅡ」、「エステコア」を使用した場合)

【写真提供】東京都墨田区 岩崎歯科医院 岩崎圭祐先生

直接法

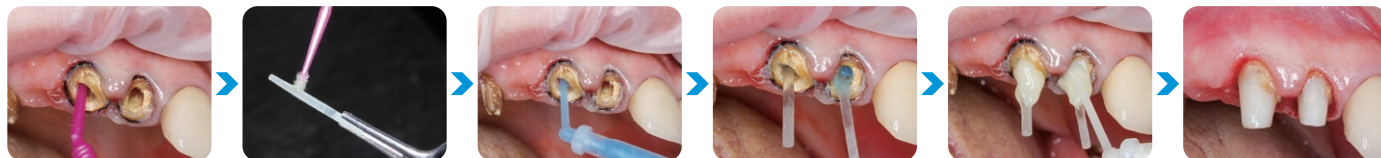

ポスト孔にボンドマー ライトレスⅡ塗布、エアブロー

トクヤマFRポストにボンドマー ライトレスⅡ塗布、エアブロー

根管部にエステコアペースト(ブルー)填入


トクヤマFRポスト挿入、光照射

歯冠部にエステコアペースト(ユニバーサル)填入

光照射、支台歯形成後

【写真提供】神奈川県横浜市 歯科佐藤 横浜鶴見 佐藤洋平先生

間接法

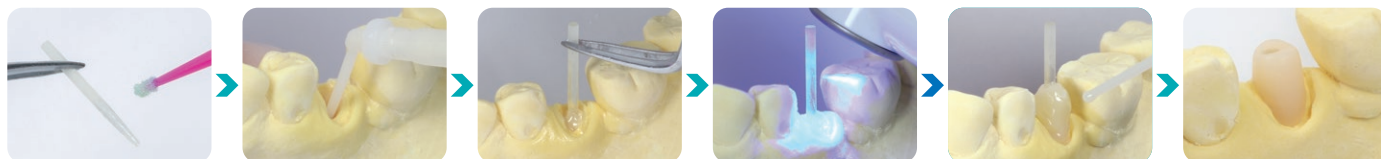

トクヤマFRポストにボンドマー ライトレスⅡ塗布、エアブロー

ブロックアウト、分離材塗布後、エステコアペースト填入

トクヤマFRポスト挿入

光照射

ペースト築盛、光照射

形態修正後

ご使用の際は必ず注意事項等情報をよくお読みください。

※別記しない限り、パンフレット記載のデータおよび画像は 弊社つくば研究所にて測定および撮影したものです。